

Recortar por los bordes.  
Doblar por la línea punteada.  
Pegar las solapas. No abrocharlas.



MUESTRA DE PELO PARA ANÁLISIS DE ADN

Nº DE MICROCHIP

**IMPORTANTE:**  
ES OBLIGATORIO COMPLETAR  
LOS DATOS SOLICITADOS.



NO USAR

POR FAVOR, PARA LA TOMA DE LA  
MUESTRA SIGA LAS INSTRUCCIONES  
PRESENTES AL REVERSO DEL SOBRE

ANTE CUALQUIER DUDA COMUNIQUESE  
CON EL LABORATORIO  
Tel./Fax: 011-4771-1366 / 1982 (8.00 a 14.00)  
e-mail: infohab@sra.org.ar

SOLICITANTE:.....  
RAZA:..... Nº DE CRIADOR:.....  
RP:..... SEXO:.....  
NOMBRE:.....

CERRAR EL SOBRE

## INSTRUCTIVOS PARA LA TOMA DE MUESTRA

### PELO

- IDENTIFIQUE CORRECTAMENTE EL ANIMAL.
- LIMPIE LA COLA DEL MISMO.
- SEPARÉ UN MECHÓN DE 30-40 PELOS.
- **EN EQUINOS:** DE LA CRIN O DEL NACIMIENTO DE LA COLA.
- **EN BOVINOS:** DEL EXTREMO INFERIOR DE LA COLA (BORLA).
- ENROLLELO EN EL DEDO INDICE Y TIRE.
- VERIFIQUE LA PRESENCIA DE BULBOS PILOSOS (PELO DE RAÍZ).

### SEMEN

- IDENTIFIQUE LA PASTILLA O PAJUELA DE SEMEN A ANALIZAR.
- **PAJUELA:** COLOQUELA EN UN SOBRE BIEN IDENTIFICADO.
- **PASTILLA:** COLOQUELA EN UN TUBO LIMPIO Y ESTE EN UN SOBRE CORRECTAMENTE IDENTIFICADO.
- ESTE TIPO DE MUESTRAS PUEDEN REMITIRSE AL LABORATORIO A TEMPERATURA AMBIENTE.
- EL DESCONGELADO DE LA MUESTRA NO AFECTA EL ANÁLISIS DE ADN.